

ARMURERIE SALCET



Fabricant de Projecteurs Hypodermiques

4 Route du Théron 46220PRAYSSAC - Tél : 05.65.30.62.63- Fax 05.65.21.48.26

E-mail : armurerie.salcet@orange.fr site web <http://www.armureriesalcet.fr>



REEMPLISSAGE DE LA FLECHETTE SWIFT

- 1- Dévisser le pompon arrière
- 2- Introduire la tirette de remplissage et la visser au piston situé au fond du tube
- 3- Reculer la tirette en butée arrière et la bloquer
- 4- Dévisser la canule
- 5- Remplissage de la fléchette avec le produit à injecter
- 6- Visser la canule
- 7- Placer le manchon obturateur
- 8- Relâcher la tirette de remplissage
- 9- Replacer le pompon

ENTRETIEN

- 1- Après utilisation rincer à l'eau chaude la fléchette
- 2- Vérifier l'état de la fléchette
- 3- Nettoyer à l'eau savonneuse le pompon si nécessaire
- 4- Si nécessaire nettoyage du piston et du tube,**
- 5- Dévisser la vis Allen située à l'arrière de la fléchette
- 6- En tirant sur le pompon désolidarisé le bouchon arrière
- 7- Après nettoyage du piston du tube du ressort graisser et remonter