



Projecteur hypodermique « CaptorS1 »



Le projecteur hypodermique « Captor S1 » est facile de mise en œuvre et d'entretien. Il est utilisé pour des injections de capacité de 3ml à 5ml idéal pour animaux en cage.

Préparation du Captor S1 au tir:


A l'aide de la pompe gonflé la réserve d'air à la pression voulue (voir tableau de tirs), manomètre sur la réserve d'air, dévisser le canon de sur le pistolet et placer la fléchette à l'intérieur en poussant la fléchette avec un stylo environ 1 cm dans le canon revisser le canon (attention au joint dans le pistolet), le projecteur est prêt.

Tir

Lors du tir presser rapidement et énergiquement sur la gâchette car c'est le souffle qui donne la puissance à la fléchette.

Pour droitier tenir le canon de la main gauche et le pistolet de la main droite monté le projecteur à hauteur de l'œil et viser le haut du pistolet et le bout du canon.

Remplissage de la fléchette « Swift » :

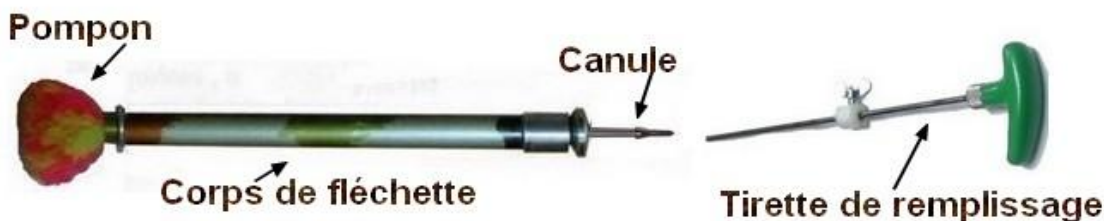

1. Placer l'aiguille sur la fléchette en vissant
2. Placer le manchon obturateur (petit tuyau en silicone) sur la l'aiguille mais pas sur le trou de l'aiguille
3. Faire manœuvrer le piston en tirant sur le pompon huilé si nécessaire
4. Aspirer le produit anesthésiant ou autre, chasser l'air, faire glisser le manchon sur le trou.
5. lâcher le pompon, la fléchette est prête.
6. Après le tir rincer abondamment à l'eau chaude la fléchette
7. Huiler avec l'huile silicone
8. Stocker dans une poche plastic fermée