

Projecteur Hypodermique « Bergeron Jet N »



Mise en œuvre :

1° Dévisser le canon

2° Insérer la fléchette dans le canon par une rotation.

3° Insérer le réducteur de pression réglé en fonction de la distance et de la capacité de la fléchette anesthésiante, voir tableau de tirs.

4° Placer la capsule de propulsion, couleur en fonction de la puissance de tir, voir tableau de tirs.

5° Viser le canon sur son mécanisme.

6° Armer le projecteur au dernier moment afin de travailler en toute sécurité, par un mouvement avant puis arrière et bloquer en position arrière.

7° Allumer le point rouge.

Le projecteur est prêt.

Caractéristiques du projecteur:

Poids : 2,15 kg

Longueur totale : 115cm

Distance de tir utile avec des fléchettes de 10ml 40 mètres

Capacité des fléchettes : 5ml, 6ml, 7ml, 10ml, 15ml.

Matière : corps du projecteur aluminium anodisé, mécanisme bronze aciéré, canon acier rectifié